


MANUEL DES DISPOSITIFS THERMO-THÉRAPEUTIQUES PETIETEC

🐾 SYSTEME DE CHAUFFAGE HIGH-TECH IRL AU GRAPHÈNE



Tissu thermique
3 en 1 imperméable

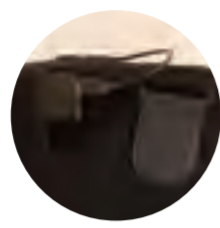

Mini batterie
portable

🐾 CARACTÉRISTIQUES ET PRINCIPES

2

- a)Thermothérapie de précision locale, traitement ciblé
- b)Soulagement des douleurs articulaires / musculaires
- c)Amélioration du sommeil, du niveau d'activité et de la qualité de vie de l'animal

1

- a)La thermothérapie et l'infrarouge soulagent les douleurs et accélèrent la circulation sanguine locale
- b)Le chauffage améliore la lubrification des articulations

🐾 GUIDE D'UTILISATION



- ▶ Une bonne maîtrise de l'installation avant l'utilisation est nécessaire. Il peut être utilisé lorsque l'animal est calme ou au repos. L'animal peut également le porter en toute sécurité en mouvement.
- ▶ Durée de traitement conseillée : 15 à 30 minutes à chaque fois. Aucun effet secondaire en cas de prolongation de durée.
- ▶ Cette gamme de produits dispose de 3 plages de température selon la sensibilité de l'animal. Après de nombreux tests approuvés par des spécialistes, nos produits ne surchauffent pas et ne brûlent pas l'animal pendant une longue utilisation correcte.
- ▶ La conduction thermique au graphène est diffusée uniformément et fournit une sensation de chaleur douce et très confortable. Vous pouvez les utiliser en toute confiance.

🐾 PATHOLOGIES

- Chiens atteints d'une maladie articulaire chronique
- Chiens qui se remettent d'une chirurgie articulaire
- Chiens âgés avec une activité réduite et un mauvais sommeil
- Chiens sujets à l'arthrite
- Chiens effectuant une grande quantité d'exercices ou d'activités (ex. chiens de course, chiens policiers, chiens de sauvetage, etc.)
- Chiens présentant des symptômes de douleurs neuropathiques



🐾 CONSEILS D'UTILISATION

- ▶ Avant le coucher pour soulager la douleur et rendre à l'animal une meilleure qualité de sommeil
- ▶ Le matin pour réduire la raideur articulaire. L'application de chaleur peut accélérer le réchauffage des articulations, favorisant la circulation sanguine autour des articulations et la lubrification des articulations.
- ▶ Les chiens qui subissent des douleurs articulaires ont besoin d'activités appropriées pour favoriser la récupération, mais à cause de la douleur, ils sont réticents à bouger. Vous pouvez utiliser nos produits avant une promenade ou des exercices afin de soulager leur douleur. Cela rend les chiens plus disposés.
- ▶ Pendant une activité non intense (par exemple, une promenade), la chaleur améliore la performance de l'activité.
- ▶ Pendant une crise de douleur articulaire ou musculaire, la chaleur soulage la douleur et calme l'humeur du chien.
- ▶ Nous conseillons une utilisation régulière et continue pour une amélioration des capacités d'activité et de qualité de sommeil du chien.
- ▶ Dans le cas d'une faiblesse d'un membre avant ou arrière, il est recommandé d'appliquer le produit sur les deux membres avant ou arrière afin d'éviter d'affaiblir les autres membres.
- ▶ Avant un exercice de haute intensité comme un échauffement musculaire ou avant le coucher après une journée d'exercices, pour la récupération.

